




Veloped 杖ホルダー – 組み立て説明書

Veloped 用の 2 ピースの杖ホルダー。輸送や保管のために Veloped を折りたたむときに安全ストラップとしても機能します。この杖ホルダーはすべての Veloped モデルに適合します。

スマートフォンまたはデバイスで QR コードをスキャンして、ビデオの説明を表示します。

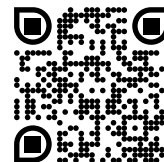

① リアホルダーを取り付けます。

リアホルダーをリアバーティカルフレームチューブの上部、高さ調整用クイックリリースのすぐ下に巻きつけます。



② ストラップをしっかりと引っ張ります。

ストラップを強く引っ張り、チューブに巻き付け、ベルクロで固定します。ストラップの余った部分はそのままぶら下げてください。



③ リアループを調整します。

リアループの大きさは、ベルクロを緩めて調整することができます。丸みを帯びた円形にするためには、ループを軽く絞る必要があるかもしれません。



④ フロントホルダーを取り付けます。

フロントホルダーをアップパーフレームチューブのバスケットレール取り付け部のすぐ後ろに巻き付けます。このとき、滑り止めパッチがフレームチューブの方を向いていることを確認しましょう。



⑤ フロントループを調整します。

フロントループの大きさは、ベルクロを緩めて調整することができます。丸みを帯びた円形にするためには、ループを軽く絞る必要があるかもしれません。



⑥ ステッキを取り付けます。

杖を後ろから差し込み、まずリアホルダーに通し、次にフロントホルダーに通して取り付けます。



⑦ フレームを固定します。

Velopedを持ち運ぶときや収納するとき、折りたたんだ状態で杖ホルダーのストラップを使ってフレームを固定することができます。