



## Veloped 杖ホルダー - 組み立て説明書

Veloped 用の 2 ピースの杖ホルダー。輸送や保管のために Veloped を折りたたむときに安全ストラップとしても機能します。この杖ホルダーはすべての Veloped モデルに適合します。

スマートフォンまたはデバイスで QR コードをスキャンして、ビデオの説明を表示します。

### ① リアホルダーを取り付けます。

リアホルダーをリアバーティカルフレームチューブの上部、高さ調整用クイックリリースのすぐ下に巻きつけます。

### ② ストラップをしっかりと引っ張ります。

ストラップを強く引っ張り、チューブに巻き付け、ベルクロで固定します。ストラップの余った部分はそのまぶら下げてください。

### ③ リアループを調整します。

リアループの大きさは、ベルクロを緩めて調整することができます。丸みを帯びた円形にするためには、ループを軽く絞る必要があるかもしれませんが。

**④ フロントホルダーを取り付けます。**

フロントホルダーをアッパーフレームチューブのバスケットレール取り付け部のすぐ後ろに巻き付けます。このとき、滑り止めパッチがフレームチューブの方を向いていることを確認しましょう。

**⑤ フロントループを調整します。**

フロントループの大きさは、ベルクローを緩めて調整することができます。丸みを帯びた円形にするためには、ループを軽く絞る必要があるかもしれません。

**⑥ ステッキを取り付けます。**

杖を後ろから差し込み、まずリアホルダーに通し、次にフロントホルダーに通して取り付けます。

**⑦ フレームを固定します。**

Velopedを持ち運ぶときや収納するとき、折りたたんだ状態で杖ホルダーのストラップを使ってフレームを固定することができます。