

TRIONIC

バッテリーパック付き 1600 ルーメン Trionic LED フロント ライトをお選び いただきありがとうございます。

このマニュアルでは、ライト ホルダーとライトを Walker に取り付ける方法 (下の左側の列) と、Veloped に取り付ける方法 (下の右側の列) の両方を示します。

左の写真の A は、Walker 用のホルダー取り付け部品 (ネジ 2 本 + ワッシャー 2 個) を示しています。 B は、Veloped 用のホルダー取り付け部品 (ネジ 1 本 + ローレットナット 1 個 + ナット 1 個) を示しています。

ライトホルダーの取り付け

歩行器の説明書




Al. 黒い半垂直チューブの上部に、ブレーキ レバー の前にあるグリップ チューブを固定する 2 本のネジがあります。



A2. LED ライトに付属の 5mm 六角レンチを使用して、両方のネジを緩めます。



A3. グリップクランプから2本のネジを取り外しま

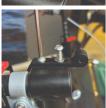

A4. ライトホルダーをグリップクランプの上に置き、円形のスロット付きライトアタッチメントを前方と上向きに向けます。クランプの穴に、ワッシャー付きの2本のネジを差し込みます。



A5.5mm六角レンチで2本のネジを締めます。注意:ネジはグリップチューズ、ゴムグリップ、ブレーキレバーを固定するため、しっかりと締め付けることが重要です。

Velopedの説明書



A1. VelopedのU字型グリップバーの中央の折りた たみヒンジにあるネジを見つけます。付属の4mm 六角レンチでネジを緩めて取り外します。



B2. 古いネジを、LEDライトに付属の長いネジに交換します。長いネジをヒンジに取り付け、4mm六角レンチで締めます。



B3. ライトホルダーの短い角度のついた端を、U字型グリップバーの下側にあるネジの下端に取り付けます。ホルダーは下向きにしてください。ワッシャー1枚とローレットナットを指で締めてホルダーを固定します。



B4. ホルダーが意図せず横向きになるのを防ぎ、ホルダーをよりしっかりと固定するには、ローレットナットを付属のステンレス製ナットに交換し、10mmのスパナで締めます。



B5. この写真は、ライトホルダーが正しく取り付けられている様子を示しています。

LEDライトをホルダーに取り付ける

歩行器の説明書



A6. ライトを取り付けるための2つのスロットがある、ライトホルダーの円形の前面端を確認します。

Velopedの説明書



B6. VelopedのU字型グリップバーの中央の折りたたみヒンジにあるネジを見つけます。付属の4mm 六角レンチでネジを緩めて取り外します。



A7. ライトのスロット付きブラケットをホルダーのスロットに差し込み、位置が合っていることを確認します。歩行器の進行方向に向かって左側から付属の蝶ナットを差し込み、締めます。



B7. ライトを取り付けるための2つのスロットがある、ライトホルダーの円形の前面端を確認します。

バッテリーパックの取り付け

歩行器の説明書



A8. 長い延長ケーブルをウォーカーの半垂直グリップ チューブに沿って通し、付属のベルクロ ストラップで固定します。

Velopedの説明書



B8. 長い延長ケーブルを Veloped の U 字型グリップ バーに沿って通し、付属のベルクロ ストラップで固定します。



A9. マジックテープの余分な長さはハサミでカットできます。



B9. マジックテープの余分な長さはハサミでカットできます。





A10. バスケットの後ろのジッパー付きポケットに バッテリーパックを入れます。




B10. バスケットの後ろのジッパー付きポケットにバッテリーパックを入れます。

パッケージには以下が含まれています

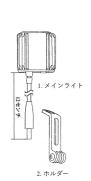

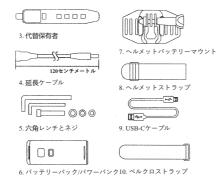

ライトの操作方法

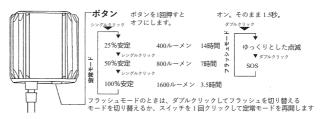

電圧 > 6.5 V: 緑電圧 < 6.5 V: 赤

注意: このライトは、以下の電圧範囲で動作するように特別に設計されています。 5~12V DC。入力が6.5Vを下回ると、電源インジケータが点灯します。 ライトが赤に変わります。これはパッテリー残量が少なく、充電が必要であることを意味します。

