



バッテリーバック付き 1600 ルーメン Trionic LED フロント ライトをお選びいただきありがとうございます。

このマニュアルでは、ライト ホルダーとライトを Walker に取り付ける方法 (下の左側の列) と、Veloped に取り付ける方法 (下の右側の列) の両方を示します。

左の写真の A は、Walker 用のホルダー取り付け部品 (ネジ 2 本 + ワッシャー 2 個) を示しています。B は、Veloped 用のホルダー取り付け部品 (ネジ 1 本 + ローレットナット 1 個 + ナット 1 個) を示しています。



ライトホルダーの取り付け

歩行器の説明書



A1. 黒い半垂直チューブの上部に、ブレーキレバーの前にあるグリップチューブを固定する 2 本のネジがあります。



A2. LED ライトに付属の 5mm 六角レンチを使用して、両方のネジを緩めます。

A3. グリップクランプから 2 本のネジを取り外します。

A4. ライトホルダーをグリップクランプの上に置き、円形のスロット付きライトアタッチメントを前方と上向きに向けます。クランプの穴に、ワッシャー付きの 2 本のネジを差し込みます。

A5. 5mm 六角レンチで 2 本のネジを締めます。注意：ネジはグリップチューブ、ゴムグリップ、ブレーキレバーを固定するため、しっかりと締め付けることが重要です。

Velopedの説明書



B1. Veloped の U 字型グリップバーの中央の折りたたみヒンジにあるネジを見つけます。付属の 4mm 六角レンチでネジを緩めて取り外します。

B2. 古いネジを、LED ライトに付属の長いネジに交換します。長いネジをヒンジに取り付け、4mm 六角レンチで締めます。

B3. ライトホルダーの短い角度のついた端を、U 字型グリップバーの下側にあるネジの下端に取り付けます。ホルダーは下向きにしてください。ワッシャー 1 枚とローレットナットを指で締めてホルダーを固定します。

B4. ホルダーが意図せず横向きになるのを防ぎ、ホルダーをよりしっかりと固定するには、ローレットナットを付属のステンレス製ナットに交換し、10mm のスパナで締めます。

B5. この写真は、ライトホルダーが正しく取り付けられている様子を示しています。

LEDライトをホルダーに取り付ける

歩行器の説明書

A6. ライトを取り付けるための2つのスロットがある、ライトホルダーの円形の前面端を確認します。

A7. ライトのスロット付きブラケットをホルダーのスロットに差し込み、位置が合っていることを確認します。歩行器の進行方向に向かって左側から付属の蝶ナットを差し込み、締めます。

Velopedの説明書

B6. VelopedのU字型グリップバーの中央の折りたたみヒンジにあるネジを見つけます。付属の4mm六角レンチでネジを緩めて取り外します。

B7. ライトを取り付けるための2つのスロットがある、ライトホルダーの円形の前面端を確認します。

バッテリーパックの取り付け

歩行器の説明書

A8. 長い延長ケーブルをウォーカーの半垂直グリップチューブに沿って通し、付属のベルクロストラップで固定します。

A9. マジックテープの余分な長さはハサミでカットできます。

A10. バスケットの後ろのジッパー付きポケットにバッテリーパックを入れます。

Velopedの説明書

B8. 長い延長ケーブルをVelopedのU字型グリップバーに沿って通し、付属のベルクロストラップで固定します。

B9. マジックテープの余分な長さはハサミでカットできます。

B10. バスケットの後ろのジッパー付きポケットにバッテリーパックを入れます。

パッケージには以下が含まれています

ライトの操作方法