

## Veloped ボトルホルダー - 組み立て説明書


Velopedと歩行者用ユニバーサルサイズのボトルホルダー。ネジ留め式クランプでVelopedフレームに固定します。カラー：ブラック。

ボトルホルダー、クランプマウント、3mm六角レンチが同梱されています。


スマートフォンまたはデバイスでQRコードをスキャンして、ビデオの説明を表示します。



① クランプマウントからネジを1本外して取り外します。

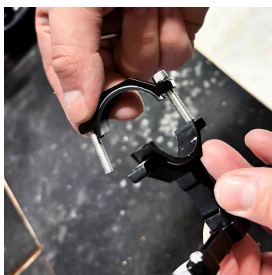

② もう一方のネジを可能な限り緩めますが、クランプに取り付けたままにしておきます。

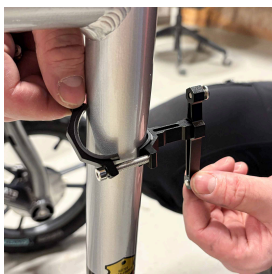

③ クランプの半分を90度回転させると、クランプをVelopedフレームに取り付けやすくなります。ボトルホルダーの短いアームを上に向けて、クランプをVelopedの右または左のリアフレームチューブの垂直部分に取り付けます。クランプをVelopedフレームにねじ込む際は、両方のネジが均等に締められていることを確認してください。



④ クランプブラケットの2本のネジを締めて、ボトルホルダーをその上にねじ込みます。このとき、ボトルホルダーの側面の開口部が外側を向くようにしてください。



⑤ Velopedボトルホルダーが正しく取り付けられ、使用できるようになりました。おめでとうございます。