



歩行器用杖ホルダー - 組み立て説明書

歩行器のハンドルとフレームに取り付ける2ピースの杖ホルダーです。上部にはスマートなクイックロック機能があり、杖の着脱が素早く行えます。歩行器 9er、12er、14erに適合します。

スマートフォンまたはデバイスでQRコードをスキャンして、ビデオの説明を表示します。



- ① ログタイプが上を向くように上部ホルダーを回します。



- ② ホルダーをハンドグリップチューブの上部にカチッとはめ込みます。

ホルダーをハンドグリップチューブの上部にカチッとはめ込み、プラスドライバーでねじ込んで固定します。



- ③ 杖ホルダーと背もたれの両方を取り付けると

注意: プレーキレバーの位置を調整し、背もたれの横にある上部の杖ホルダーにスペースを確保してください。杖ホルダーと背もたれを歩行器に取り付けるには、杖ホルダーを外側に約30度傾ける必要がある場合があります。




④ 下部ホルダーをフレームに取り付けます

左右どちらの側を組み立てる場合も、下部ホルダーを回してフレームの外側からネジに手が届くようにします。下部ホルダーをフレームに取り付けるには、ストラップをフレームチューブに巻き付け、ホルダーの穴に差し込みます。



⑤ ネジ/ストラップを締めます

4 mm 六角レンチを使用してネジ/ストラップを締めます。

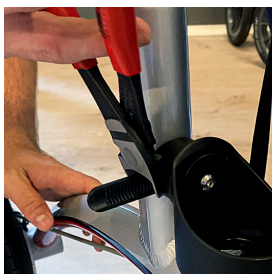

⑥ ストラップの余分な長さをカットします

ケーブルカッターでストラップの余分な長さを切ります。



⑦ すぐに使用可能