



Trionic ウォーカーバックレスト - 組み立て説明書



耐水性と耐久性のある600Dポリエステル製の人間工学に基づいたパッド入りの背もたれは、歩行器のウォーカー9er、12er、および14erに適合します。着席時に快適で安全なサポートを提供します。背もたれの長さ/深さは調整可能です。

背もたれは、S、M、Lの3つの異なる長さでご用意しております。

① ネジを外します。

2つのクランプからネジとナットを取り外します。

② 背もたれを取り付けます。

クランプを少し開き、グリップチューブに取り付けてください。**重要:** 重要: 背もたれは少し斜めになっているため、「TRiONiC」のロゴが正しい位置に来ていることを確認してください。



③ ずっと上まで。

2つのクランプを押して一番上に移動させます。ブレーキレバーを少し後方に動かすために、ブレーキレバーのネジを緩める必要がある場合があります。





④ 背もたれを固定します。

4mmのアレンキーを使用して、両方のクランプをネジとナットで固定してください。背もたれのストラップは、取り付けの時点で前方を向いている必要があります。

⑤ この写真が正しい組み立て方の例となります。



歩行器を広げる前。

ローラーを折りたたむには、背もたれを上に向けてください。

必要であれば。

背もたれが短すぎる/長すぎる場合は、長さを調整することができます。2本のネジとナットを取り外し、その後背もたれを再度組み立ててください。

