

マニュアル: Trionic Walkerの背もたれストラップの交換



① 3mmの六角レンチを使用して、ストラップを固定しているネジを緩めます。 反対側でも繰り返します。



② ネジ、ナット、管状スペーサーを必ず回収してください。





マニュアル: Trionic Walkerの背もたれストラップの交換



(5)新しい交換用ストラップをパッドに挿入します。

重要: 写真のように、ストラップの端を TRIONIC のロゴに合わせます。



6 ストラップの端の穴に管状のスペーサーを挿入します。

