




マニュアル : Trionic Walkerの背もたれストラップの交換

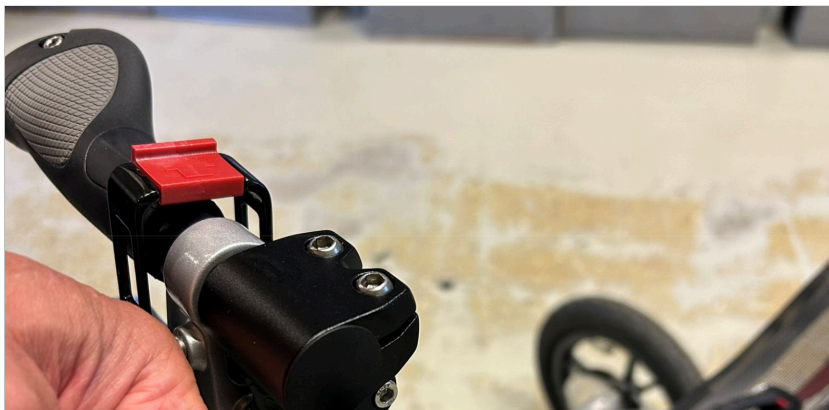

- ① 3mmの六角レンチを使用して、ストラップを固定しているネジを緩めます。
反対側でも繰り返します。



- ② ネジ、ナット、管状スペーサーを必ず回収してください。





マニュアル : Trionic Walkerの背もたれストラップの交換



⑤ 新しい交換用ストラップをパッドに挿入します。

重要: 写真のように、ストラップの端を TRIONIC のロゴに合わせて。



⑥ ストラップの端の穴に管状のスペーサーを挿入します。

。

