



ウォーカー輸送バッグ- 梱包手順


Walker 輸送バッグは、メインの輸送バッグと小さな収納/持ち運び用バッグで構成されています。輸送バッグはすべての Walker モデルに適合します。

すべての Trionic Walker モデルに適合します。




① メインバッグを開ける

収納バッグのファスナーを開け、メインの輸送用バッグを開梱します。

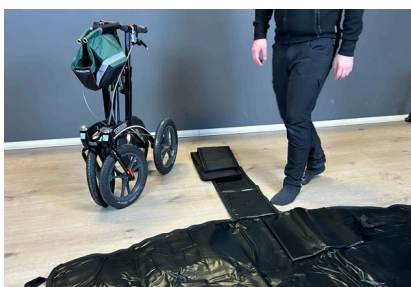


② メインバッグを広げます。

メインバッグのジッパーを全長にわたって開き、バッグのフラップを床に広げます。

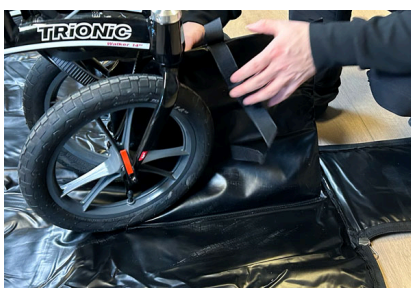

③ 歩行器をバッグの上に置きます。

ウォーカーをメインの輸送バッグの中央部分に置きます。メインのバッグには、ベルクロストラップ付きのパッド入り保護フラップが組み込まれています。パッド入り保護フラップを上方に引き上げ、前輪フォークの間に置き、塗装を保護します。

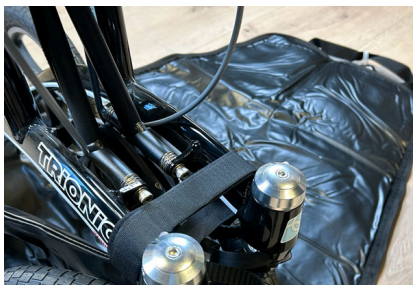

④ 折りたたんだフレームを一体型のベルクロストラップで固定します。



⑤ 中央のフラップをウォーカーの上に折ります。

⑥ サイドフラップを持ち上げてメインジッパーを閉じます。

⑦ この写真は、Walker が正しく梱包されている様子を示しています。

梱包方法

スマートフォンまたはデバイスで QR コードをスキャンして、ビデオの説明を表示します。