



ウォーカー輸送バッグ- 梱包 手順


Walker 輸送バッグは、メインの輸送バッグと小さな
収納/持ち運び用バッグで構成されています。輸送バッ
グはすべての Walker モデルに適合します。

すべての Trionic Walker モデルに適合します。




① メインバッグを開ける

収納バッグのファスナーを開け、メインの輸送用バッ
グを開梱します。

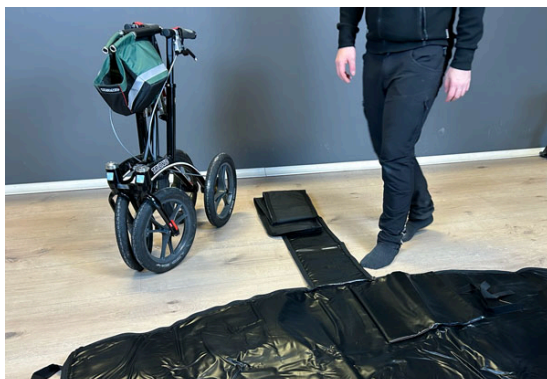


② メインバッグを広げます。

メインバッグのジッパーを全長にわたって開き、バッ
グのフラップを床に広げます。

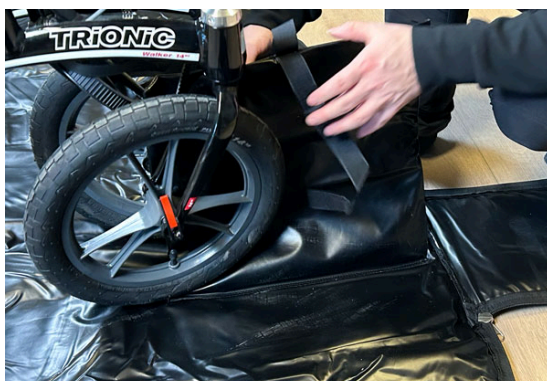


③ 歩行器をバッグの上に置きます。


ウォーカーをメインの輸送バッグの中央部分に置きま
す。メインのバッグには、ベルクロ ストラップ付きの
パッド入り保護フラップが組み込まれています。パッ
ド入り保護フラップを上方に引き上げ、前輪フォーク
の間に置き、塗装を保護します。

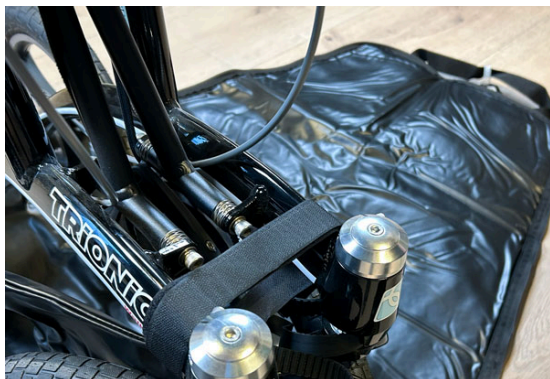

④ 折りたたんだフレームを一体型のベルクロストラップで固定します。

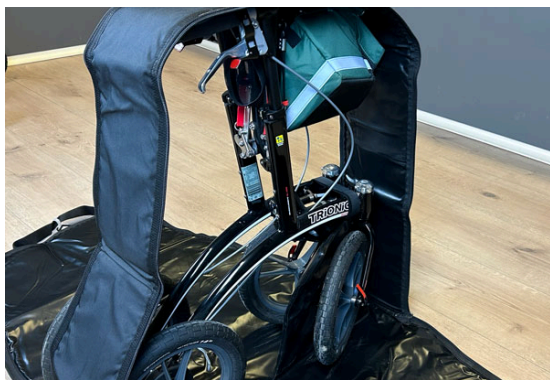

⑤ 中央のフラップをウォーカーの上に折ります。

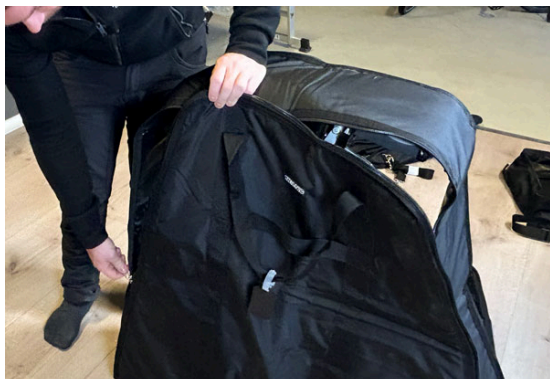

⑥ サイドフラップを持ち上げてメインジッパーを閉じます。



⑦ この写真は、Walker が正しく梱包されている様子を示しています。

梱包方法



スマートフォンまたはデバイスで
QR コードをスキャンして、ビデオ
の説明を表示します。